

QuikRead go[®] Strep A

Stručný návod na použitie



1 Urobte výter pomocou tampónu, ktorý je súčasťou súpravy. **Vložte** tampón do extrakčnej skúmavky, pridajte 2 kvapky bezfarebnej extrakčnej reagensie 1 a 2 kvapky červenej extrakčnej reagensie 2. Roztok zmení farbu na žltoranžovú.



2 **Miešajte** tampónom v roztoku 30 sekúnd. Potom ho nechajte stáť v roztoku najmenej 90 sekúnd, nie však dlhšie ako 15 minút. **Odstráňte** z kyvety hliníkové viečko. Nedotýkajte sa kyvety v jej dolnej časti.



3 **Nakloňte** extrakčnú skúmavku a nechajte tampón sklznúť pozdĺž jej vnútornej steny, čo umožní preniesť tekutinu do kyvety. Pokiaľ zostane väčšie množstvo tekutiny v skúmavke, prelejte ho do kyvety. Rôzne roztok zamiešajte, zmení farbu na červenú. Počas vyberania tampónu z kyvety ho **pritlačte** na jej vnútornú stenu.



4 Kyvetu pevne **uzatvorte** viečkom s reagensiou Strep A. Netlačte na vnútornú ružovú časť viečka. Akonáhle je pridaná vzorka do kyvety, môže byť pred spracovaním uchovaná až 4 hodiny. Na prístroji QuikRead go **zvoľte Meranie**.



5 **Vložte** kyvetu do meracej cely prístroja čiarovým kódom k sebe. Prístroj automaticky spustí proces merania a na displeji sa zobrazuje jeho priebeh. **Ked'** je meranie ukončené, na displeji sa zobrazí výsledok a kyveta je automaticky vysunutá z meracej cely.

Pred vykonaním testu si prosím prečítajte podrobnejšie informácie v návode na použitie.

*Ďalšie informácie nájdete na adrese:
www.quikread.sk*

Pozrite si video s pracovným postupom:

- » www.oriondiagnostica.sk/Produkty/QuikRead-go/QuikRead-go-Strep-A/
- » youtube

QuikRead go[®] Strep A

Skladovanie reagensíí



Súprava s reagensiami

Skladovanie neotvorenej súpravy pri teplote 2–25°C: do dátumu expirácie súpravy



Neotvorené kvety vybraté z hliníkového obalu

Uskladnenie pri 2–8°C:

6 mesiacov

Uskladnenie pri 18–25°C:

3 mesiace



Tuba s reagenčnými viečkami, extrakčné reagensie a kontrolné materiály

Neotvorená tuba pri 2–25°C: do dátumu expirácie súpravy

Po prvom otvorení pri 2–25°C: 12 mesiacov




Otvorená kveta

Test vykonajte do dvoch hodín od otvorenia kvety. Pred testovaním vytemperujte kvetu na 18–25°C.

Pokyny pre prípravu vzorky

Pri vykonávaní testu je dôležité v priebehu extrakcie vŕiť tampónom v kvete. Pri vyberaní tampónu z kvety pritlačte tampón k vnútornej stene kvety.

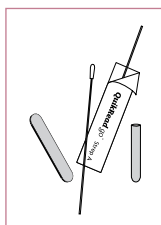


1 Pripravte si všetko, čo budete potrebovať k odberu vzorky od pacienta: tampón QuikRead go Strep A, lekársku lopatku a extrakčnú skúmavku QuikRead go Strep A. Používajte ochranný odev vrátane rukavíc na jedno použitie.


Používajte iba QuikRead go odberové tampóny, ktoré sú súčasťou súpravy. Použitie iných tampónov by mohlo spôsobiť chybné výsledky, pozitívne aj negatívne.



2 Požiadajte pacienta, aby otvoril ústa. Z obalu vyberte sterilný tampón QuikRead go Strep A. Pomocou špachtle zatlačte jazyk dole a začnite s odberaním vzorky.

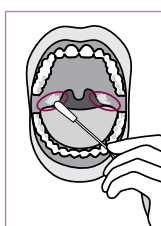

3 Pred samotným odberom vzorky odstráňte prípadný hlien iným tampónom z hrdla pacienta. Pri odobraní vzorky tampónom otáčajte, aby ste si zaistili kvalitnú vzorku. Nezabudnite vykonať ster z oboch tonzíl. Vzorky odobraté z iných miest ústnej dutiny môžu byť príčinou falošne negatívneho výsledku. Väčšie množstvo slín alebo mikróby z iných častí ústnej dutiny môžu mať rušivý účinok pre test.

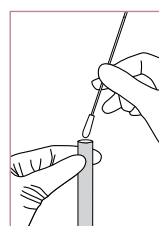

4 Vyberte tampón z úst pacienta a vložte ho do extrakčnej skúmavky QuikRead go. Buďte opatrní, aby ste sa tampónom nedotkli iného povrchu okrem úst pacienta, mohli by ste tak zapríčiniť kontamináciu bežnou flórou.

Zaistite správnu extrakciu vzorky. Sledujte farebné zmeny v kvete. Farba indikuje správne PH pri extrakcii a taktiež pri neutralizácii. Dodržujte časový postup testu.

Product	Kat. č.
QuikRead go Strep A, 50 testov	135883
Prístroj QuikRead go	135867



Orion Diagnostica Oy, Finsko
Zastúpenie pre ČR, HU, PL, SR, Bělohorská 57, 169 00 Praha 6, Česká republika
Tel.: +421 944 313 888
www.oriondiagnostica.sk, www.quikread.sk

