

QuikRead® FOB kvantitatívne

Návod na použitie

1




Načítajte kartu.

2



Odstráňte z kyvety kryciu fóliu. Hladina roztoku musí byť medzi dvomi ryskami vyznačenými na kyvete. Nedotýkajte sa kyvety v jej spodnej časti.

3



Pretrepte odberovú skúmavku, odlomte špičku a prvé tri kvapky zlikvidujte do odpadu. Potom pridajte tri kvapky vzorky do kyvety.

4



Kyvetu pevne uzatvorte viečkom s FOB čínielom. Netlačte na vnútornú hnedú časť viečka. Kyvetu vložte do meracieho otvoru prístroja.

5



Prebieha meranie blanku (cca 20 sekúnd). Stlačením vnútornej hnedej časti viečka pridajte číniel FOB.

6



Vyberte kyvetu a dôkladne premiešajte dnom nahor.

7



Vložte kyvetu späť do meracieho otvoru. Do 1 minúty sa na displeji zobrazí výsledok.

Podrobné informácie
nájdete v návode na
použitie.

POCT



Orion Diagnostica Oy, Fínsko

Zastúpenie pre ČR, HU, PL, SR, Bělohorská 57, 169 00 Praha 6, Česká republika, tel: +421 944 313 888, fax: +420 233 350 532

orion@oriondiagnostica.sk, www.oriondiagnostica.sk, www.quikread.sk

888-015K, 6/2012